

Praxis

Dr. med. Theo Plajer und

Facharzt für Diagnostische Radiologie

Dr. med. Heike Henrich

Fachärztin für Diagnostische Radiologie

Info und Kurzanleitung zu unserem CD-Betrachtungsprogram:

Centricity DICOM – Viewer 3.0 (GE)

- erforderlich ist Windows Explorer ab Version. 6.0

- 1) Ggf „Pop-up-Blocker“ für die CD deaktivieren („vorübergehend zulassen“)
- 2) Lizenzvereinbarung akzeptieren
- 3) mit „Mausdoppelklick“ Bilder laden

Um die Schichtebenen darzustellen:

4) Mauszeiger auf das Bild, mit der rechten Maustaste:

Menü: 1.-Change Layout -> Series Areas : 1 x 2 (links klick)

2.-Cutlines -> Show cutlines of displayed Images (links klick)

Für Rückfragen: Tel. 0201-8675160