

Tipps zu unserem Viewer „K-PACS“

- 1) durch Doppelklick auf den Eintrag der Untersuchung werden die Bilder aufgerufen (ggf. auch gesondert nur eine Serie- auf „+“ den Verzeichnisbaum weiter öffnen)
- 2) am unteren Bildrand finden sich die Klappmenüs (automatisch ausgeblendet) für die Bildbearbeitung, einschließlich Fenstern, Messen, Bild unterteilen etc.)
- 3) an der rechten Bildseite findet sich das Klappmenü für die Referenzlinie (standardmäßig bereits angewählt – „Lines“), damit werden bei unterteiltem Bild die Referenzlinien der jeweils aktiven Bilder angezeigt.
- 4) Zum Ausdrucken eines Bildes das Bild anwählen (über Symbolleiste Bildauswahl oder auf das Kästchen links oben klicken), dann über Datei->DruckManager oder „P“ ausdrucken.
- 5) Bild als Bitmap oder JPEG exportieren über Datei->Bild(er) exportieren